




Xem sách hướng dẫn sử dụng để có thông tin đầy đủ hơn:
<http://www.mttts-asia.com/vi/dolphin-cpap/>

Màn hình hiển thị CPAP

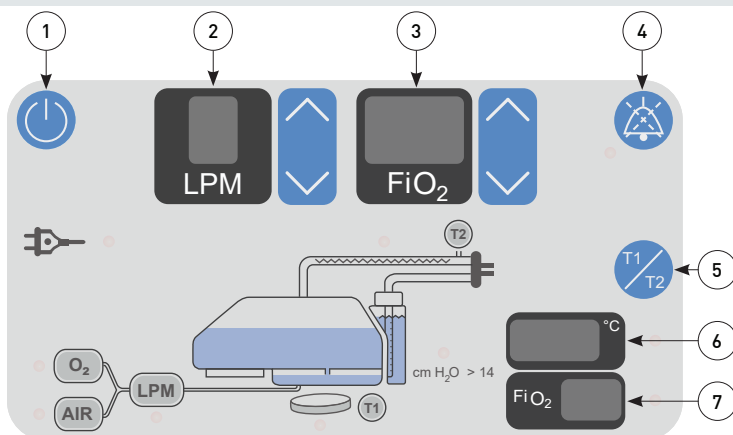

1	Nút On / Off (Giữ trong 2 giây)
2	Nút điều khiển lưu lượng
3	Nút điều khiển FiO ₂
4	Nút tắt chuông cảnh báo
5	Nút chỉnh nhiệt độ
6	Màn hình hiển thị nhiệt độ đo được
7	Màn hình hiển thị lượng FiO ₂ đo được

Cài đặt nhiệt độ bình làm ẩm và dòng khí.

Cần điều chỉnh để xử lý tình trạng tụ nước quá nhiều ở dây thở.




T1 – Nhiệt độ bình làm ẩm. Giới hạn cảm biến nhiệt độ: (31°C-37°C)



T2 – Nhiệt độ khí. Giới hạn cảm biến nhiệt độ: (35°C-40°C)

Tín hiệu cảnh báo CPAP

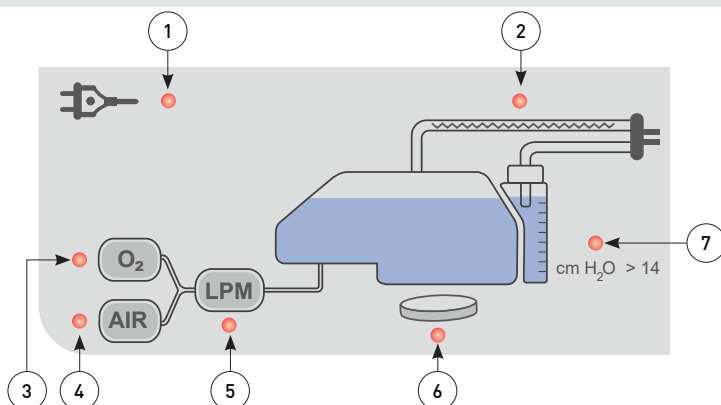


1	Mất nguồn
2	Dây nhiệt/ Cảm biến hỏng
3	Áp suất Oxy đầu vào quá thấp / cao
4	Áp suất khí đầu vào quá thấp
5	Lưu lượng quá thấp / cao
6	Bình làm ẩm hỏng
7	Áp suất quá cao (>14 cmH ₂ O)

Hiệu chỉnh cảm biến oxy

Cảm biến Oxy cần được hiệu chỉnh mỗi 3 tháng 1 lần. Chi tiết ở trang 48 của Sách Hướng dẫn sử dụng.

Ngắt kết nối

bình làm ẩm, cảm biến nhiệt độ, khí oxy đầu vào và bộ dây thở.

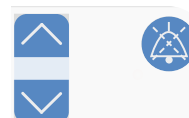

Khởi động lại máy và đồng thời ấn giữ 3 biểu tượng dưới trong vòng 5 giây


Màn hình hiển thị độ bão hòa oxy trong máu



	Nút On / Off	1	Màn hình hiển SpO ₂
	Nút điều chỉnh giới hạn cảnh báo bão hòa	2	Giới hạn cảnh báo SpO ₂ trên
	Nút tăng	3	Giới hạn cảnh báo SpO ₂ dưới
	Nút giảm	4	Màn hình hiển thị nhịp tim
	OK / Nút chọn	5	Giới hạn trên cảnh báo nhịp tim
	Nút điều chỉnh giới hạn cảnh báo nhịp tim	6	Giới hạn dưới cảnh báo nhịp tim
	Nút tắt cảnh báo nhịp tim	7	Chỉ số tưới máu
	Nút tắt cảnh báo		

Vận hành thiết bị đo độ bão hòa oxy trong máu

Đặt giới hạn cảnh báo SpO₂

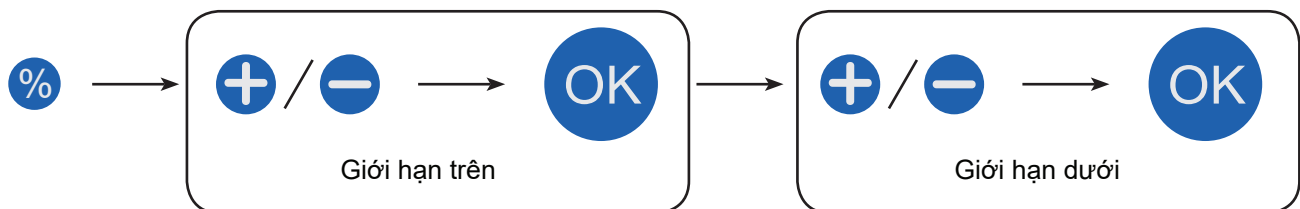

Đặt giới hạn cảnh báo nhịp tim

