




Xem sách hướng dẫn sử dụng để có thông tin đầy đủ hơn:
<http://www.mttas-asia.com/vi/giuong-suoi-so-sinh-wallaby/>


Chế độ hoạt động

Chạm vào bảng điều khiển chọn chế độ để vào màn hình lựa chọn chế độ.

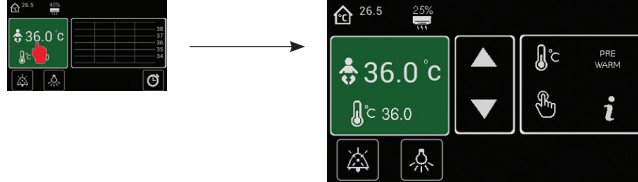

ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG


Cài đặt nhiệt độ: 34°C - 37.5°C

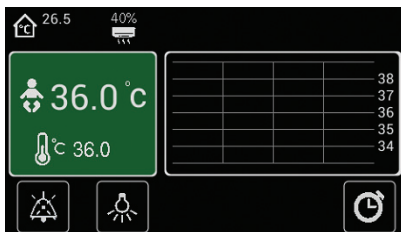

Trong chế độ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG (BABY MODE), giường sưởi sẽ kiểm soát ổn định nhiệt độ tại da của trẻ bằng cách tự động điều chỉnh nguồn nhiệt để cân bằng sự thay đổi các yếu tố sinh lý cũng như điều kiện môi trường.

SƯỞI GIƯỜNG TRƯỚC KHI ĐẶT BÉ


Cài đặt nhiệt độ: không có

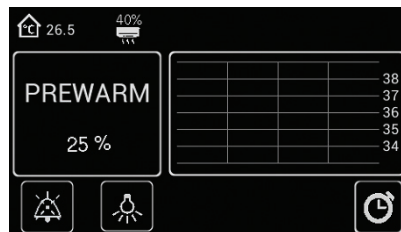

Trong chế độ SƯỞI GIƯỜNG TRƯỚC KHI ĐẶT BÉ (PREWARM MODE), giường sưởi sẽ cảnh báo các vấn đề phát sinh của bộ sưởi và môi trường tại giường trước khi đặt bé vào giường sưởi.

ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY

Cài đặt công suất sưởi: 0-100%

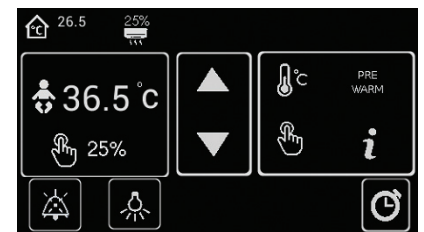

Chế độ ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY (MANUAL MODE) giúp người sử dụng điều chỉnh nguồn cấp nhiệt và lựa chọn kiểm soát nhiệt độ tại da trẻ bằng cách sử dụng cảm biến nhiệt độ đặt tại da.




Trong trường hợp nhiệt độ tại da của trẻ cao hơn 1°C so với cài đặt, nguồn nhiệt sẽ tắt (OFF) và giá trị hiển thị là 0 (không).

Bộ đếm giờ


Bộ đếm giờ APGAR

APGAR sẽ kêu ở các phút thứ 1, thứ 5 và thứ 10. Đồng hồ APGAR sẽ tắt sau 60 phút.

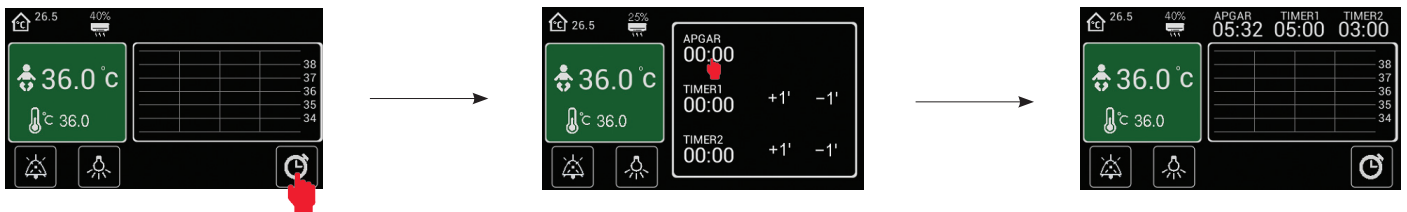
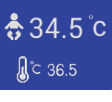
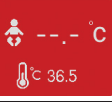

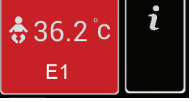



QUY TRÌNH CỦA BỘ ĐẾM GIỜ

Cảnh báo kết thúc chương trình cài đặt từ phút thứ 1 đến phút thứ 99.

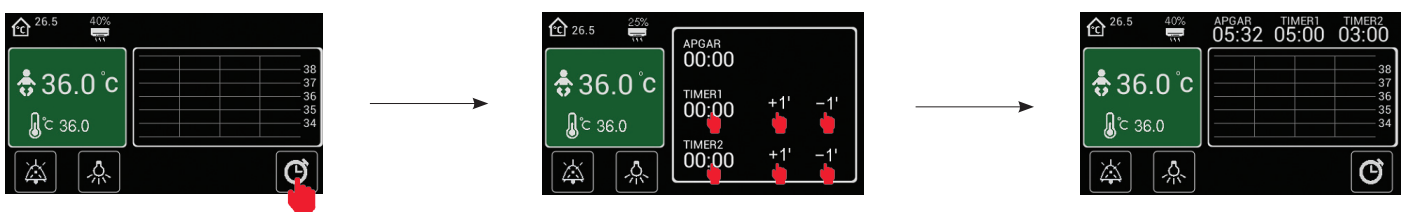


Hệ thống báo động

Báo động	Chế độ	Nguyên nhân	Kết quả	Khắc phục
HIGH SKIN TEMP (Nhiệt độ tại da cao) 	BABY (Điều khiển tự động)	Nhiệt độ đo được tại da cao hơn 1°C so với mức nhiệt được cài đặt	Nguồn cấp nhiệt bị hỏng	Chỉ tắt còi báo động
	MANUAL (Điều khiển bằng tay)	Nhiệt độ đo được tại da cao hơn 38°C	Nguồn cấp nhiệt bị hỏng	Chỉ tắt còi báo động
	PREWARM (Sưởi giường trước khi đặt bé)	Không kích hoạt	Không kích hoạt	Không kích hoạt
LOW SKIN TEMP (Nhiệt độ tại da thấp) 	BABY (Điều khiển tự động)	Nhiệt độ đo được tại da thấp hơn 1°C so với mức nhiệt được cài đặt	Công suất sưởi giảm 25%	Hủy báo động và khôi phục nguồn cấp nhiệt
	MANUAL (Điều khiển bằng tay)	Không kích hoạt	Không kích hoạt	Không kích hoạt
	PREWARM (Sưởi giường trước khi đặt bé)	Không kích hoạt	Không kích hoạt	Không kích hoạt
SENSOR DISCONNECT (Cảm biến không được kết nối) 	BABY (Điều khiển tự động)	Cảm biến nhiệt độ chưa được cắm điện hoặc bị lỗi	Công suất sưởi giảm 25%	Chỉ tắt còi báo động
	MANUAL (Điều khiển bằng tay)	Không kích hoạt	Không kích hoạt	Không kích hoạt
	PREWARM (Sưởi giường trước khi đặt bé)	Không kích hoạt	Không kích hoạt	Không kích hoạt
POWER FAILURE (Không có điện) 	ALL (tất cả)	Dòng điện không được kết nối với giường sưởi	Giường sưởi không hoạt động	Chỉ tắt còi báo động
ERROR (Lỗi) 	ALL (tất cả)	Phần mềm hoặc phần cứng của thiết bị bị hỏng (Tham khảo Hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin chi tiết)	Giường sưởi không hoạt động	Chỉ tắt còi báo động



 Thời gian tắt cảnh báo là 10 phút.

Quy trình chụp X-quang


1. Tắt công tắc chính của thiết bị và tắt tiếng báo động mất điện
2. Đợi đến khi thiết bị nguội hẳn
3. Nâng phần máng sưởi phía trên lên
4. Di chuyển phần máng phía trên sang trái hoặc sang phải
5. Sau khi kết thúc quy trình chụp X-quang, đưa phần máng sưởi về vị trí cũ
6. Đảm bảo phần máng sưởi được khóa an toàn
7. Bật thiết bị

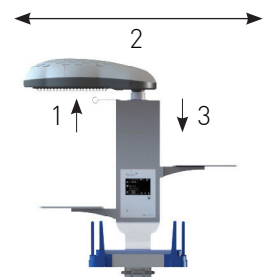

Tắt máy

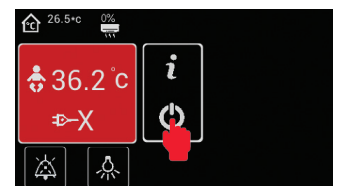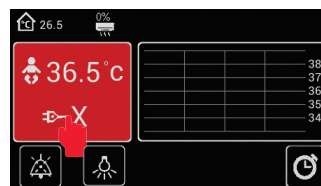

Ấn và giữ nút Tắt (OFF) trong vòng 3 giây

 Hành động này sẽ kích hoạt cảnh báo MẤT ĐIỆN (POWER FAILURE)