



Ver el Manual de usuario para información más detallada:
<http://www.mtts-asia.com/dolphin-cpap/>


Circuito de respiración, Cámara PEEp y Humidificador




No incluir el cable de sensor de temperatura en este proceso

Desmontaje


Cámara PEEp

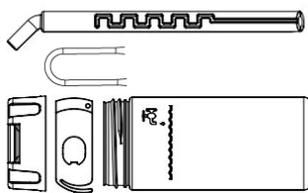

Circuito de respiración

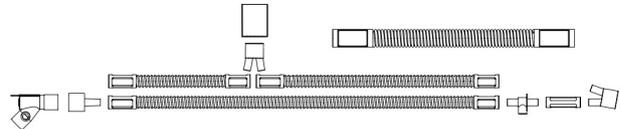

Humidificador

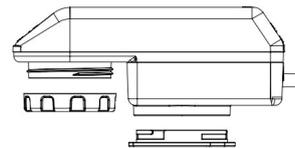

Limpieza




Autoclave

Método	Temp.	Tiempo
Autoclave vapor (pre-aspiración)	134°C	4 min
Autoclave vapor (desplazamiento gravedad)	134°C	20 min

0

Desinfección química

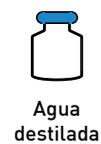

Temperatura del Sensor del Cable

Temperatura del Sensor del Cable



Limpieza



Alcohol
70%



Trapo
limpio



Asegúrese de lavarse las manos y / o usar guantes estériles cuando reensamblando el circuito de respiración.

Dolphin CPAP incluye cierto número de partes que deben ser cambiadas o revisadas a lo largo de la vida del aparato. Estas partes incluyen:

Componente	Duración aprox. de uso	Información de mantenimiento
Humidificador	2 años o 150 usos	Cambiar piezas cuando sea necesario
Cámara PEEP		
Circuito respiración		
Cepillo limpiador		
Filtro de aire	6 meses	Limpiar/cambiar según paso 1 en la p.47 en el Manual de Usuario
Sensor de oxígeno	18 meses	Calibrar cada 3 meses siguiendo el paso 2 en la p.48 en el Manual de Usuario. Contactar con un representante de con MTTs para el recambio.