

Instrucciones de montaje





Consulte el Manual del usuario para obtener información completa: http://www.mtts-asia.com/colibri-phototherapy/

1 - Retire los componentes de la caja

La caja contiene:

- 1. Estar
- 2. Base
- 3. Juego de dosel



2 - Preparación del montaje del soporte

- 1. Retire la etiqueta de protección.
- 2-3. Desenrosque lentamente la perilla de ajuste de altura.



Mientras desenrosca la perilla, asegure el poste interno con la mano para evitar una liberación incontrolada.


4. Retire la perilla de ajuste de altura.



3 - Montaje de la base


- 1. Inserte el soporte en la base.
- 2. Atornille 3 pernos en el orificio de la rosca.
- 3-4. Conecte y asegure el conector de CC.
- 5. Apriete los pernos con una llave (tamaño 13).



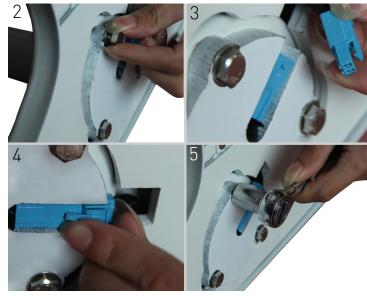

4 - Montaje del soporte

- 1. Inserte el anillo de soporte del soporte.
- 2. Atornille la perilla de ajuste de altura.

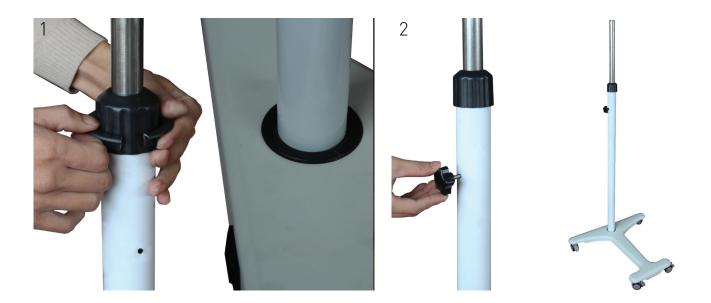

5 - Conjunto del conjunto de dosel

- 1. Extraiga el soporte de plástico con conector de CC del interior del soporte.
- 2. Conéctelo con el cable de fijación del dosel.
- 3-4. Inserte el cable conectado nuevamente en el soporte y cúbralo con el soporte de plástico.
- 5. Fije el conjunto del dosel al soporte y fíjelo con tornillos.



6 - Enchufa y enciende