

Instructions de montage





Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour des informations complètes: http://www.mtts-asia.com/colibri-phototherapy/

1 - Retirez les composants de la boîte

La boîte contient:

- 1. supporter
- 2. base
- 3. ensemble canopée



2 - Préparation de l'assemblage du supporter

- 1. Retirez l'étiquette de protection.
- 2-3. Dévissez lentement le bouton de réglage en hauteur.



Tout en dévissant le bouton, sécurisez le pôle intérieur avec la main afin d'éviter un relâchement incontrôlé.


4. Retirez le bouton de réglage de la hauteur.



3 - Assemblage de la base


- 1. Insérez le support dans la base.
- 2. Vissez 3 boulons dans le trou du filetage.
- 3-4. Connecter et sécuriser le connecteur CC.
- 5. Serrez les boulons à l'aide d'une clé (taille 13).



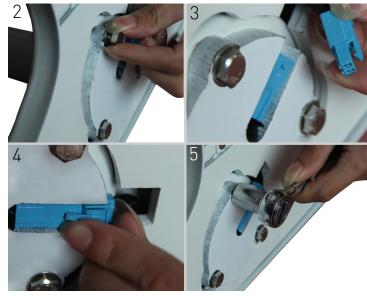

4 - Assemblage du supporter

- 1. Insérez la bague de support du supporter.
- 2. Vissez le bouton de réglage de la hauteur.

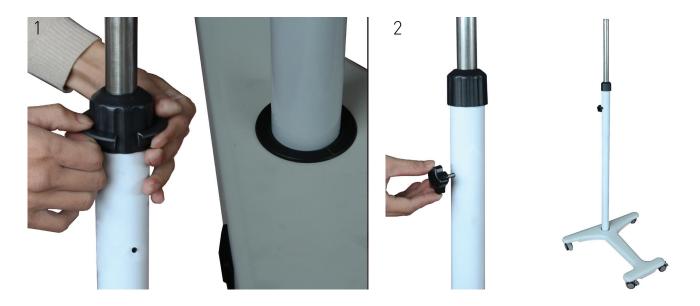

5 - Assemblage du canopée

- 1. Retirez le support en plastique avec connecteur CC de l'intérieur du supporter.
- 2. Connectez-le avec le fil de l'ensemble du couvert.
- 3-4. Insérez le fil connecté dans le support et recouvrez-le du support en plastique.
- 5. Fixez le baldaquin au support et fixez-le avec des vis.



 \triangle

2 personnes peuvent être nécessaires pour effectuer les opérations 2-4.

6 - Branchez et allumez