

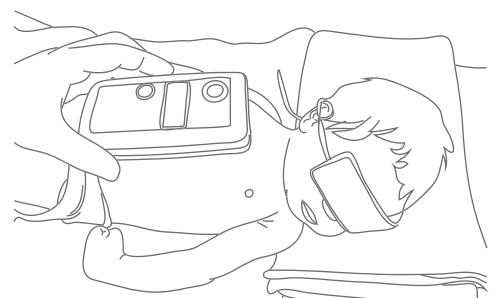


LifeKit by **MTTS**

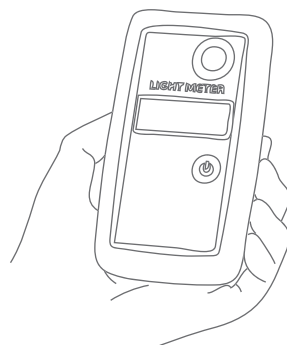

ĐỒNG HỒ ĐO CÔNG SUẤT ÁNH SÁNG ĐÈN CHIẾU VÀNG DA

Thiết bị đo chính xác công ánh sáng của đèn chiếu điều trị vàng da

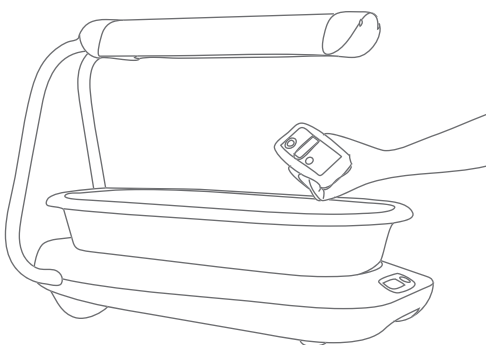

I. Tổng quan

- Thiết bị đo chính xác công suất ánh sáng của đèn chiếu điều trị vàng da
- Nhỏ gọn, di động

II. Mô tả chi tiết

1. Cảm biến

- Dải quang phổ đo được nằm trong dải bước sóng phù hợp cho điều trị bệnh lý vàng da.
- Cảm biến được gắn trên 2 mặt của thiết bị sẽ thuận tiện cho việc đo công suất ánh sáng của đèn chiếu vàng da 2 mặt Firefly do MTTTS sản xuất và các loại đèn chiếu 2 mặt khác

2. Phim bật tắt

- Phim cảm ứng dễ sử dụng độ bền cao



3. Màn hình hiển thị / Chi số

- Màn hình tinh thể lỏng (LCD)
- Hiển thị 4 chữ số; màn hình tự động tắt sau 1 phút
- Màn hình chống chói có thể nhìn dễ dàng ở những nơi ánh sáng mạnh hoặc dưới ánh nắng mặt trời

4. Vỏ hộp

- Hộp nhựa ABS độ bền cao

5. Biểu đồ dải quang phổ phù hợp

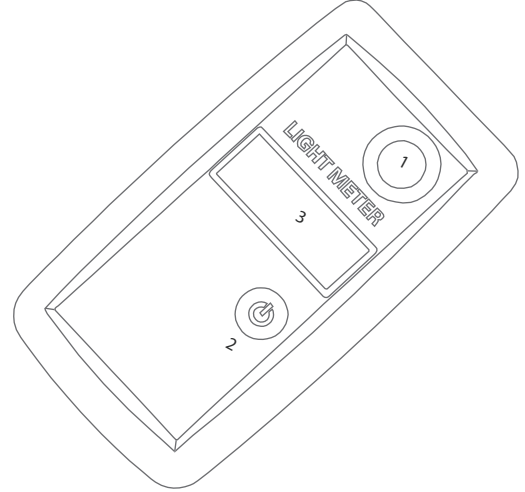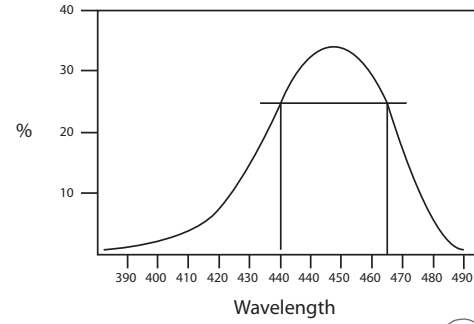

Kích thước và trọng lượng

Kích thước tổng	12.5 cm x 7 cm x 2.4 cm
Trọng lượng thực	225 g

Thông số hoạt động

Áp dụng	Sử dụng cho đèn LED và ánh sáng xanh huỳnh quang của thiết bị điều trị vàng da; nếu sử dụng thiết bị để đo công suất bước sóng ánh sáng của đèn halogen sẽ cho kết quả kém chính xác
Phạm vi đo	0.0 - 150 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ +/- 2%
Bước sóng đo được	440nm - 465nm

Thông số về công suất ánh sáng

Công suất ánh sáng từ 20 - 40 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ cho thấy đèn chiếu điều trị vàng da hoạt động bình thường.
Công suất ánh sáng < 8 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ cho thấy đèn chiếu điều trị kém hiệu quả, cần thay bóng LED cho đèn.
Khuyến cáo đo công suất ánh sáng của đèn chiếu định kỳ 1 lần/ tháng để đảm bảo thiết bị có hoạt động hiệu quả hay không.

Thông số về pin

Loại	2xAA 1.5V Alkaline, Pin không sạc
Tuổi thọ	Tối đa 120 giờ sử dụng

Thông số về môi trường

Nhiệt độ hoạt động	-10°C - 40°C
Nhiệt độ nơi lưu trữ	-20°C - 45°C
Áp suất không khí hoạt động	600 - 1300hPA
Áp suất không khí nơi lưu kho	300 - 1500hPA
Độ ẩm hoạt động	10 - 95 % RH
Độ ẩm nơi lưu trữ	5 - 95 % RH
Độ cao hoạt động	Lên tới 3000m
Chống thấm	Ip54/ Rơi 1M trên bề mặt cứng,
Chống rơi/ chống sốc	IEC68-2-32

Chứng nhận nhà sản xuất

ISO 13485: 2016
Chứng nhận hiệu chỉnh do Viện Đo Lường Việt
Nam cấp số: V11.CN5.541.19

Thông tin đặt hàng và dịch vụ

THIẾT BỊ CHÍNH	MÃ SẢN PHẨM	SỐ LƯỢNG
LIGHTMETER V7.00	BLM-1000	01
PHỤ TÙNG		
Pin	1.5V alkaline	02

HIỆU CHỈNH VÀ BẢO TRÌ

Hiệu chỉnh: Định kỳ 3 năm/ lần sau khi giao hàng;
Gửi về MTTTS để hiệu chỉnh

Bảo trì: Gửi về MTTTS để bảo trì

BẢO HÀNH

Bảo hành tiêu chuẩn 1 năm theo chính sách của MTTTS

MTTS

CÔNG TY TNHH CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ

Thông tin chi tiết và cách đặt hàng xem tại:

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

☎ 024 37 666 521
091 438 9990

📍 Số 26 ngõ 41 Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Nhà phân phối: