



Consulte el Manual del usuario para obtener información completa:  
<http://www.mttS-asia.com/impala-ventilator/>

### PASO 1 - Retire los componentes de la caja



x 1 Base



x 1 Soporte de cilindro de oxígeno



x 1 Estar



x 1 Brazo de apoyo



x 1 Cesta



x 1 Unidad de control Impala



x 1 Soporte de dispositivo



x 3 Tornillo M5x15 (Base)  
 x 2 Tornillo M5x15 (Cesta)  
 x 3 Tornillo M5x10 (Dispositivo)  
 x 2 Tornillo M10x30 (Oxígeno)


### PASO 2 - Fije el soporte a la base



### PASO 3 - Coloque la canasta



**PASO 4 - Coloque el soporte del dispositivo**

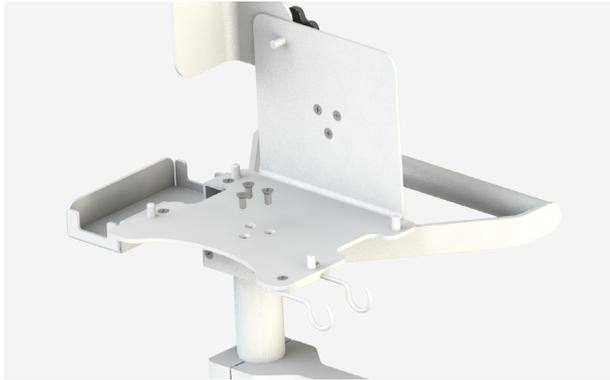

**PASO 5 - Coloque el soporte del cilindro de oxígeno**



**PASO 6 - Coloque el brazo de soporte**



**PASO 7 - Conecte la unidad de control Impala**



**PASO 8 - Enchufe y encienda**



**i** Consulte el Manual del usuario o la Guía de reprocesamiento para obtener instrucciones sobre el montaje del circuito respiratorio.