




Ver el Manual de usuario para información más detallada:  
<https://www.mttas-asia.com/impala-ventilator/>

## Preparar

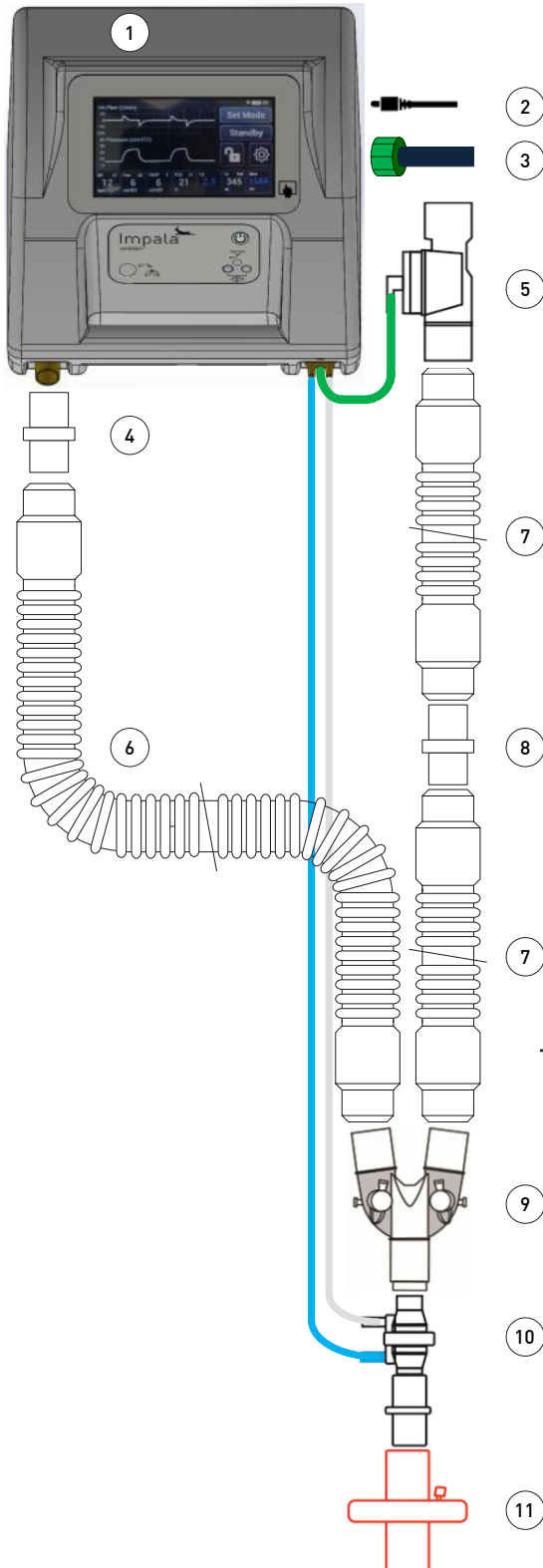

### Artículo Nombre


1	Unidad principal
2	Adaptador de 12V DC
3	Manguera de oxígeno
4	Conector estrecho (ID=15mm OD=22mm)
5	Válvula de exhalación
6	Tubo inspiratorio (ID=22mm L=120cm)
7	Tubo de exhalación (ID=22mm L=60cm)
8	Conector recto (OD=22mm OD=22mm)
9	Conector estrella (OD=22mm)
10	Sensor de flujo
11	HMEF (Filtro de intercambio de humedad de humedad)

## Operación


- 1 Mantenga presionado el botón de encendido para encender / apagar el dispositivo.




- 2 Presione OK para continuar con el último paciente o cambie el perfil del paciente para comenzar con un nuevo paciente


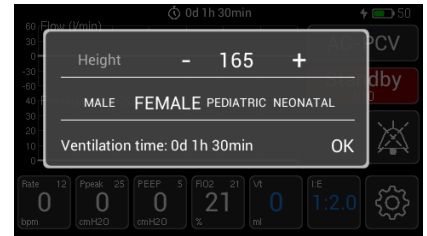


- 3 Siga las instrucciones en la pantalla para calibrar el sensor de oxígeno, el sensor de flujo y realizar la prueba de estanqueidad


 Omitir estos pasos puede resultar en precisión de medición

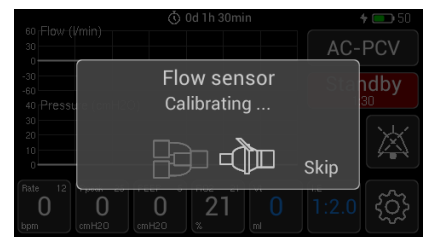



- 4 Escoger modo de ventilación

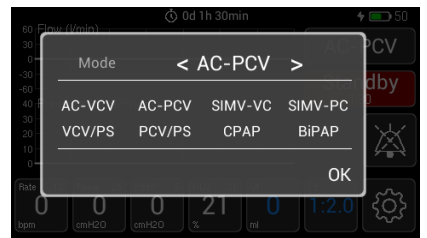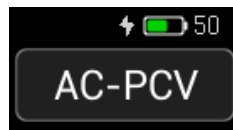

- 5 Establecer apropiado parámetros

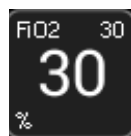

- 6 Establecer límites de alarma

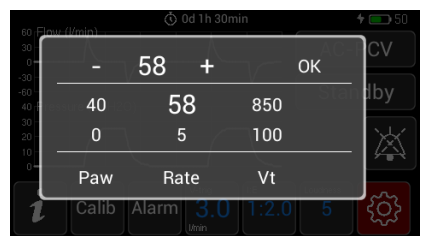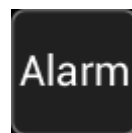

- 7 Iniciar / detener ventilación

