




Consulter le Manuel d'Utilisation pour de plus amples informations:
<https://www.mttS-asia.com/impala-ventilator/>

Installer

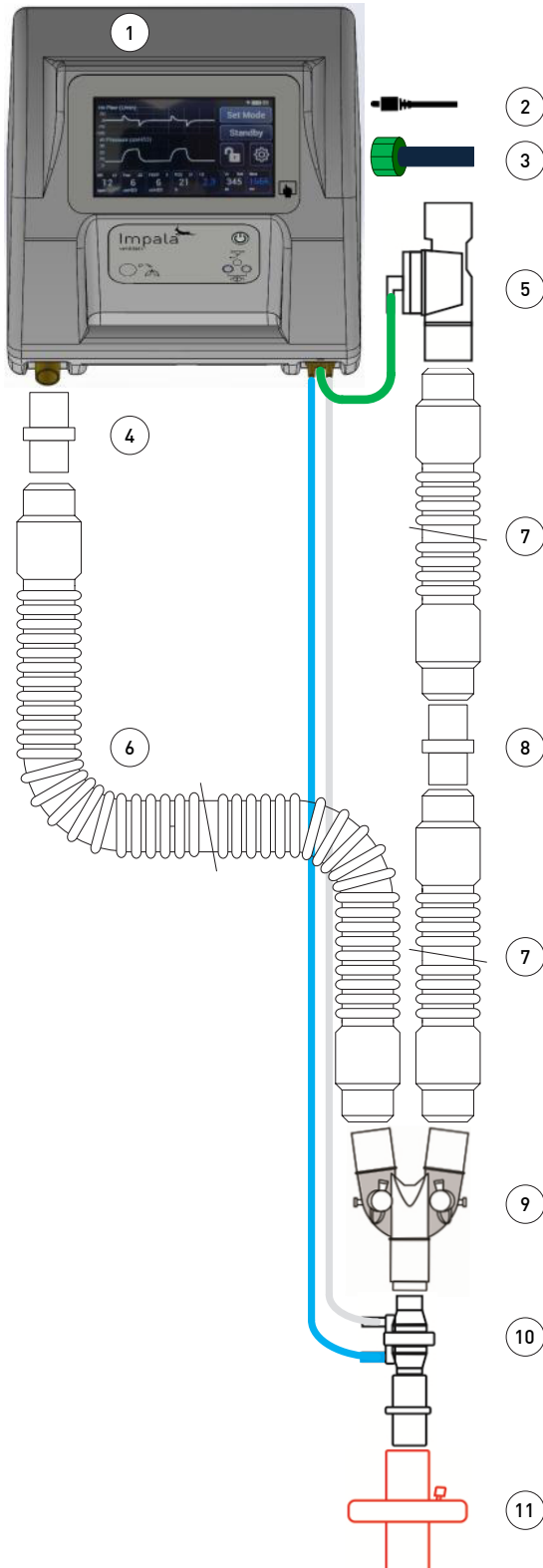

Article Nom


1	Unité principale
2	Adaptateur 12V DC
3	Tuyau à oxygène
4	Connecteur droit (ID=15mm OD=22mm)
5	Soupape d'expiration
6	Tube inspiratoire (ID=22mm L=120cm)
7	Tube expiratoire (ID=22mm L=60cm)
8	Connecteur droit (OD=22mm OD=22mm)
9	Connecteur en étoile (OD=22mm)
10	Capteur de débit
11	HMEF (Filtre d'échange d'humidité d'humidité)

Opération


- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer / éteindre l'appareil.




- 2 Appuyez sur OK pour continuer avec le dernier patient ou modifier le profil du patient pour commencer avec un nouveau patient


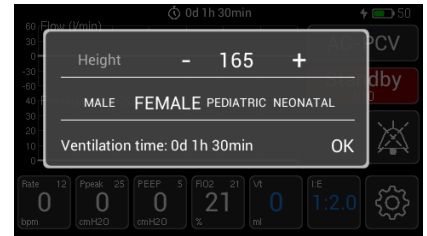


- 3 Suivez les instructions à l'écran pour calibrer le capteur d'oxygène, le capteur de débit et pour effectuer le test d'étanchéité

 Ignorer ces étapes peut entraîner imprécision de mesure

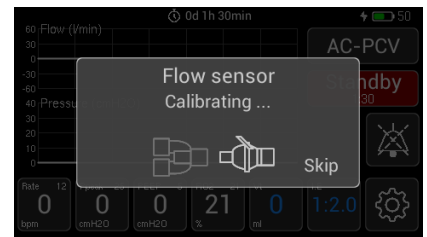



- 4 Choisir mode de ventilation

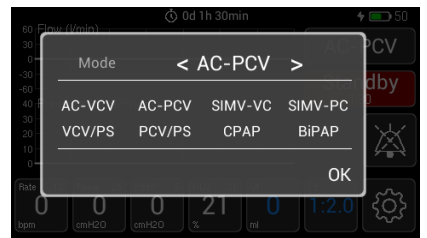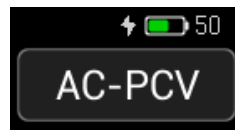

- 5 Définir approprié paramètres



- 6 Définir les limites d'alarme

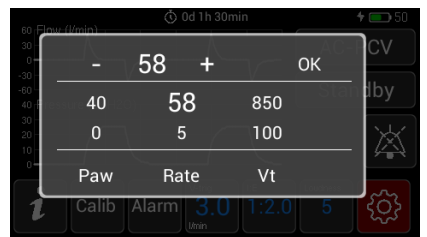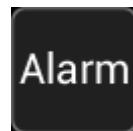

- 7 Commencer arrêter ventilation

