


# Wallaby Accessoires Instructions de montage MTTS





Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour des informations complètes: http://www.mtts-asia.com/wallaby-warmer/

### Liste des composants optionnels

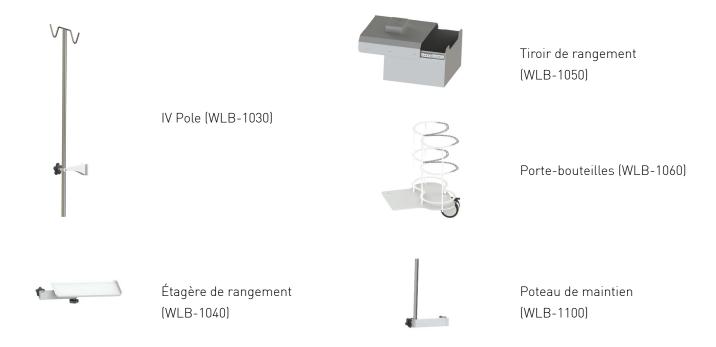

#### Porte-bouteilles (WLB-1060)



## Tiroir de rangement (WLB-1050)

1 Déconnecter les parties supérieure et inférieure Appuyez sur le loquet noir des deux côtés et faites-le glisser



2 Fixez la partie supérieure à l'unité de contrôle Utilisez 2 x boulons M10x25



3 Connecter la partie inférieure Faites glisser jusqu'à ce que vous entendiez un son de «clique»



## Poteau IV (WLB-1030), étagère de stockage (WLB-1040), Poteau de maintien (WLB-1100)

