



Ver el Manual de usuario para información más detallada:  
<http://www.mttts-asia.com/firefly-phototherapy/>

## Panel de control



1. Botón de encendido - Enciende y apaga el dispositivo.
2. Pantalla - Muestra el 'tiempo de tratamiento', así como las 'horas totales de uso del dispositivo' Firefly.

## Advertencias



**Mensajes de error:** En el caso de que Firefly sufra un error menor, el número de error se mostrará en el panel de control. Firefly sigue siendo seguro, pero, por favor, contactar con MTTTS y mencionar el número de error y el número de serie del dispositivo.



**Advertencia sobre la vida útil de los LED:** Los LED azules de Firefly proporcionan un tratamiento eficaz durante 60 000 horas.

## Información de seguridad




NO mover el Firefly mientras el paciente está en el dispositivo.



Cuando se utiliza la fototerapia con Firefly el paciente debe colocarse SIEMPRE en la cuna.

## Criterios de medición de la irradiación

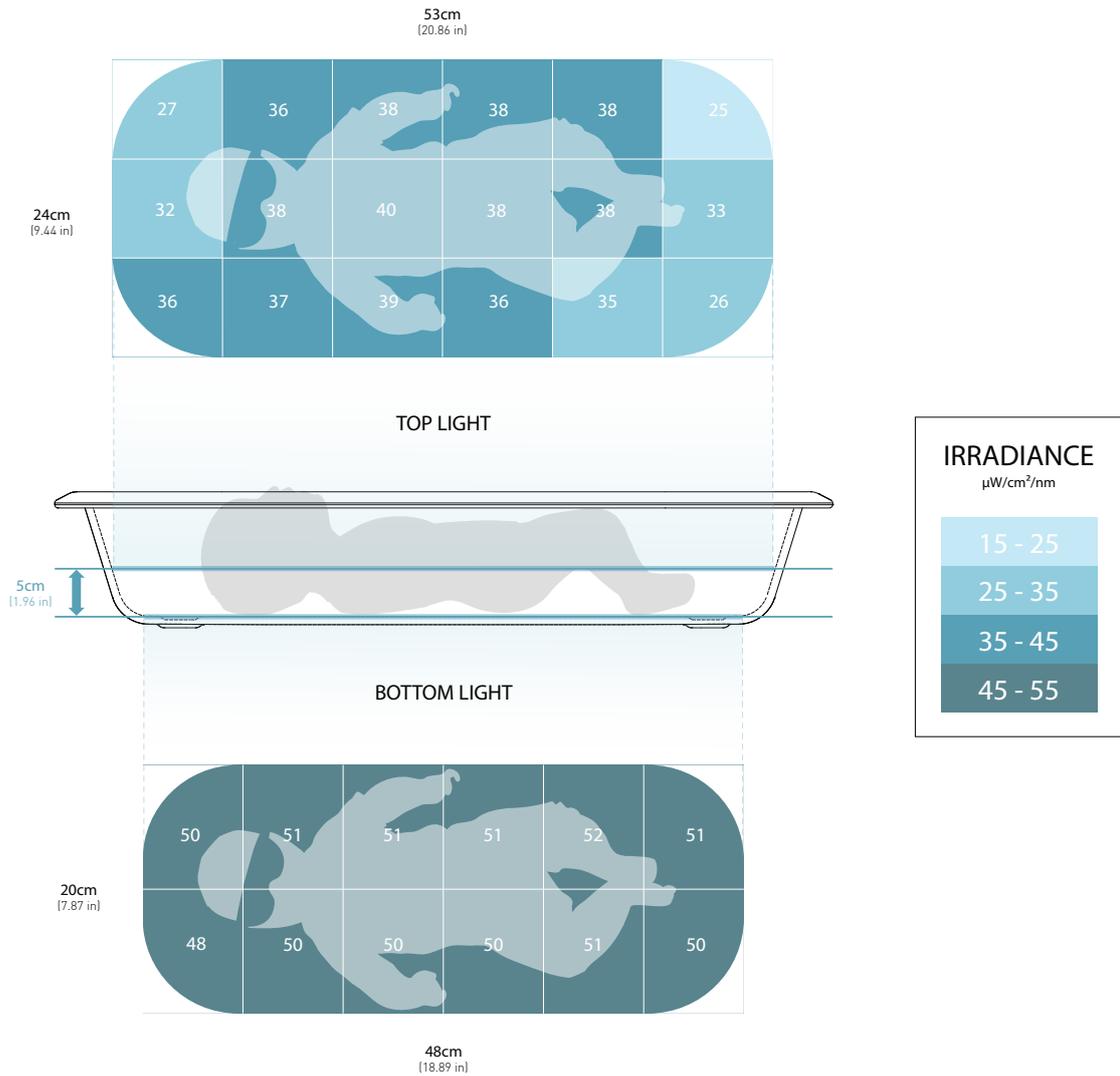

## Limpeza y desinfección



- ✓ Desinfectar la cuna solamente con una solución que contenga por lo menos 70% de alcohol. Aplicar el desinfectante con un paño limpio o una esponja blanda. Esperar a que el dispositivo se seque después de limpiar o desinfectar antes de usarlo.
- ⊘ NO usar alcohol para desinfectar ninguna otra parte del dispositivo.
- ⊘ NO sumergir ninguna parte del dispositivo en agua o alcohol.