




Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour des informations complètes:
<http://www.mttts-asia.com/firefly-phototherapy/>

Panneau de configuration

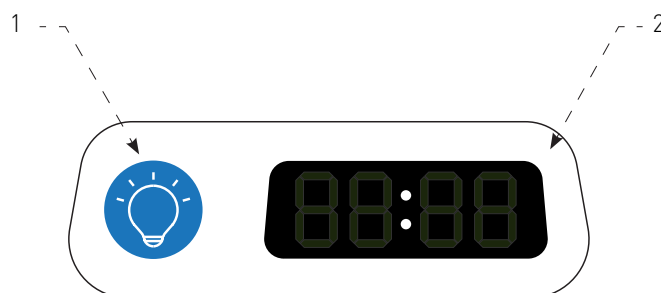

1. Bouton d'alimentation - Allume et éteint l'appareil.
2. Écran - Affiche le «temps de traitement», ainsi que le «total d'heures de fonctionnement» de l'utilisation de Firefly.

Avertissements



Messages d'erreur: Si Firefly a une erreur mineure, le numéro de l'erreur sera affiché sur le panneau de commande. Le Firefly peut toujours être utilisé en toute sécurité. Veuillez toutefois contacter MTTs et indiquer le numéro d'erreur et le numéro de série de l'appareil.



Avertissement relatif à la durée de vie des voyants: les voyants bleus de la Firefly sont conçus pour fournir un traitement efficace pendant 60 000 heures.

Sécurité




NE transportez PAS le Firefly lorsque le patient est dans l'appareil.



Lors de l'utilisation de la photothérapie Firefly, le patient doit TOUJOURS être placé dans le berceau.

Irradiance

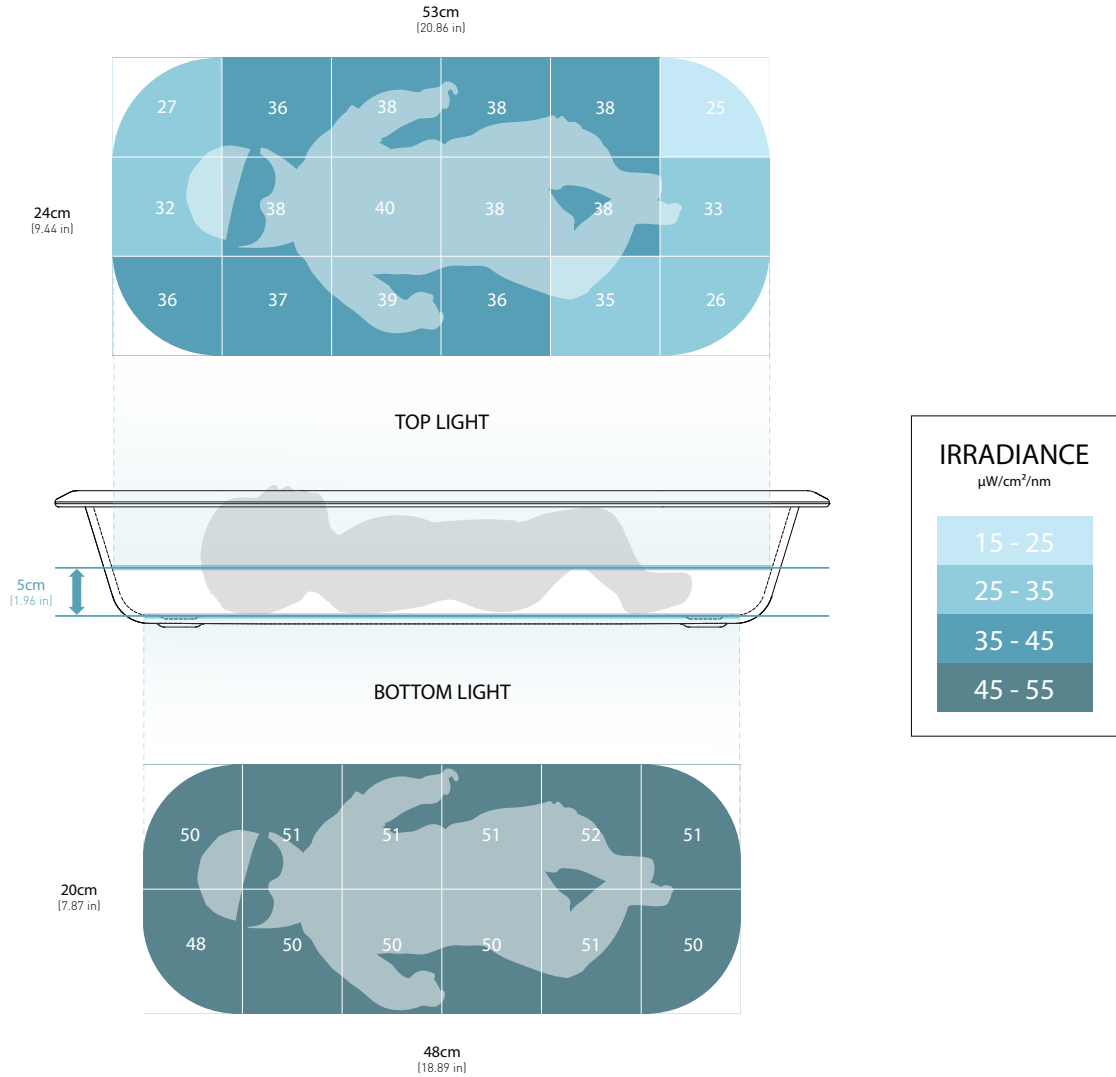

Nettoyage et désinfection



- ✔ **Désinfectez le berceau uniquement** avec une solution contenant au moins 70% d'alcool. Appliquez le désinfectant avec un chiffon propre ou une éponge douce. Attendez que l'appareil sèche après le nettoyage ou la désinfection avant de l'utiliser.
- ⊘ **NE PAS** utiliser d'alcool pour désinfecter d'autres pièces de l'appareil.
- ⊘ N'immergez aucune partie de l'appareil dans de l'eau ou de l'alcool.