




Xem sách hướng dẫn sử dụng để có thông tin đầy đủ hơn:  
<http://www.mtts-asia.com/vi/den-chieu-vang-da-2-mat-firefly/>

## Bảng điều khiển

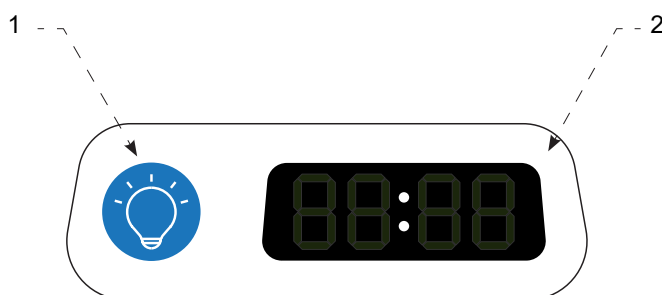

1. Công tắc nguồn - Bật (ON) hoặc tắt (OFF) thiết bị
2. Mặt hiển thị - Thể hiện 'thời gian điều trị', cũng như 'tổng số giờ sử dụng thiết bị' đèn chiếu Firefly.

## Cảnh báo



**Thông báo lỗi:** Trong trường hợp Đèn chiếu Firefly có một lỗi nhỏ thì số của lỗi đó sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển. Đèn chiếu Firefly vẫn hoạt động an toàn, tuy nhiên hãy liên hệ MTTT và thông báo số của lỗi hiển thị cùng với số sê ri của máy.



**Cảnh báo tuổi thọ của bóng đèn LED:** Tuổi thọ bóng đèn xanh LED của đèn chiếu Firefly ước tính lên đến 60 000 giờ.

## Thông tin an toàn




**KHÔNG** di chuyển Đèn chiếu Firefly khi bệnh nhân đang được điều trị



Khi sử dụng đèn chiếu Firefly, bệnh nhân nên **LUÔN LUÔN** được đặt trong nôi.

## Tiêu chuẩn đo lường bức xạ

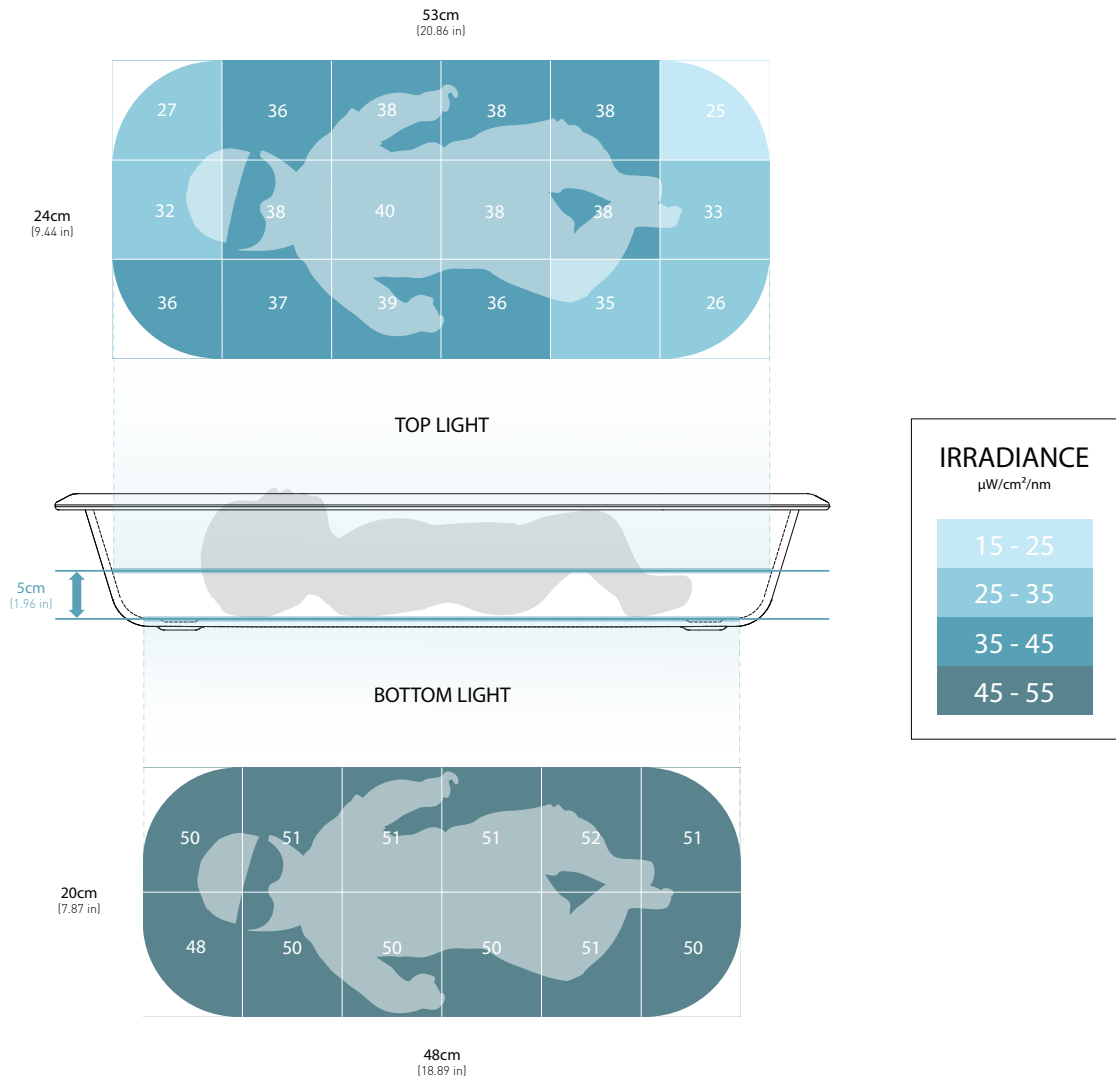

## Làm sạch và khử trùng



- ✓ Chỉ khử trùng nội với dung dịch có chứa ít nhất 70 % cồn . Sử dụng chất khử trùng với một miếng vải sạch hoặc miếng bọt biển mềm. Chờ thiết bị khô sau khi làm sạch hoặc khử trùng trước khi sử dụng.
- ⊘ KHÔNG sử dụng cồn để khử trùng bất kỳ phần nào khác của thiết bị.
- ⊘ KHÔNG ngâm bất kỳ phần nào của thiết bị trong nước hoặc cồn.