



Tham khảo hướng dẫn sử dụng để có thông tin đầy đủ hơn:  
<https://www.mttas-asia.com/beluga-resuscitator/>

## CHUẨN BỊ MÁY

1

Bật/tắt máy bằng cách nhấn và giữ nút nguồn



2

Kiểm tra pin đầy hoặc sạc nếu cần thiết



3


Căn chỉnh cảm biến oxy



4

Nối oxy bình hoặc oxy trung tâm, nối ống thở và van PEEP chữ T

Lưu ý: mở van lưu lượng oxy tối đa sau khi kết nối

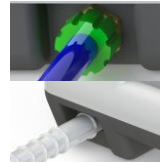

## VẬN HÀNH MÁY

5

Bật van PEEP. Bật đầu nối mặt nạ trên van PEEP bằng tay, phổi giả hoặc nắp đi kèm



6

Chọn cài đặt PIP trên màn hình



7


Cài đặt PEEP bằng cách vận van PEEP và theo dõi giá trị đo trên màn hình.

Lưu ý: Luôn kiểm tra và cài đặt lại PEEP sau khi điều chỉnh PIP



8

Kiểm tra lại PIP/PEEP bằng cách bịt-nhả van PEEP

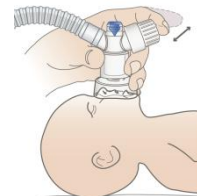

9

Lắp van PEEP vào mặt nạ bệnh nhân và bắt đầu quá trình hồi sức bằng cách bịt-nhả van PEEP

10

Điều chỉnh mức FiO2 bằng cách chọn trên màn hình

