


 Больше информации:
<http://www.mtts-asia.com/dolphin-cpap/>

Дыхательный контур, камера РЕЕР и увлажнитель

 Не включайте в этот процесс кабель датчика температуры.

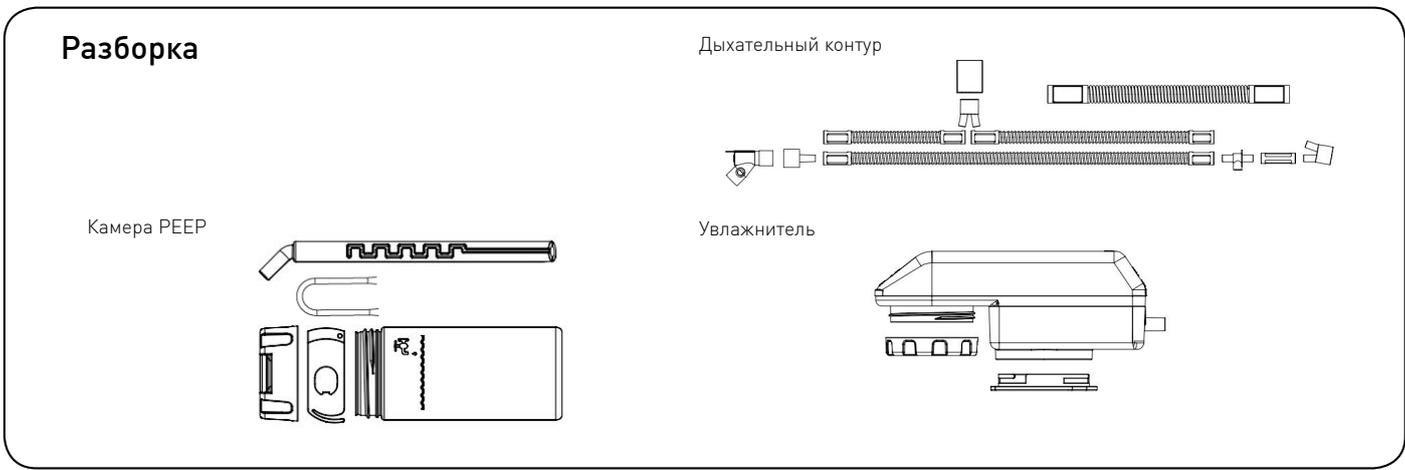

Автоклав

Метод	Темп.	Время
Паровой автоклав (предварительный вакуум)	134°C	4 мин
Паровой автоклав (гравитационное смещение)	134°C	20 мин.

ИЛИ



Кабель датчика температуры

Кабель датчика температуры



Уборка



70%
Алкоголь



Чистая
ткань



Обязательно мойте руки и / или надевайте стерильные перчатки, когда повторная сборка дыхательного контура.

Dolphin CPAP включает в себя ряд деталей, которые необходимо заменять или обслуживать в течение всего срока службы устройства. Эти части включают:

Компонент	Прибл. Продолжительность использования	Информация о техническом обслуживании
Увлажнитель	2 года или 150 использований	При необходимости замените детали
Камера РЕЕР		
Дыхательный контур		
Щетка		
Воздушный фильтр	6 месяцев	Очистите / замените в соответствии с шагом 1 на стр. 47 в Руководстве пользователя.
Датчик кислорода	18 месяцев	Выполняйте калибровку каждые 3 месяца в соответствии с шагом 2 на стр. 48 Руководства пользователя. Обратитесь к представителю MTTС для замены.