




Xem sách hướng dẫn sử dụng để có thông tin đầy đủ hơn:
<http://www.mttts-asia.com/vi/den-chieu-vang-da-colibri/>

Bảng điều khiển

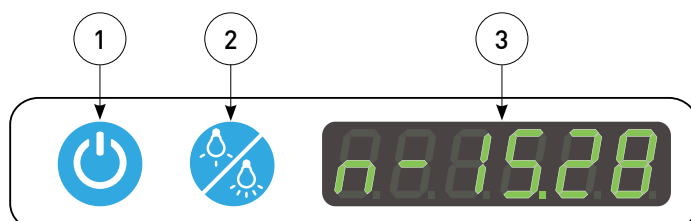

1	Nút On/Off	Ấn nút để bật hoặc tắt máy và sử dụng các chức năng của máy
2	Nút điều chỉnh chế độ	Ấn nút để chọn chế độ tiêu chuẩn hoặc tăng cường
3	Màn hình hiển thị	Hiển thị chế độ và thời gian điều trị

Chọn chế độ

Colibri Phototherapy có hai chế độ hoạt động:

- Chế độ bình thường (STANDARD): $\sim 37 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$
- Chế độ tăng cường (INTENSIVE): $\sim 53 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$



Ấn nút On/OFF để khởi động máy. Màn hình hiển thị tổng thời gian hoạt động của máy trong 3 giây.



Màn hình tiếp tục đếm thời gian điều trị của chế độ bình thường.



Ấn nút "Therapy Mode Button" để chọn chế độ. Màn hình thể hiện tổng thời gian điều trị tăng cường trong 3 giây.




Màn hình tiếp tục đếm thời gian điều trị của chế độ tăng cường.




Ấn nút On/OFF để tắt máy.

Đo bước sóng ánh sáng

CHẾ ĐỘ TIÊU CHUẨN

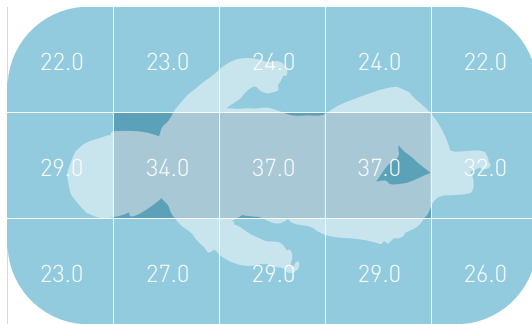

CHẾ ĐỘ TĂNG CƯỜNG

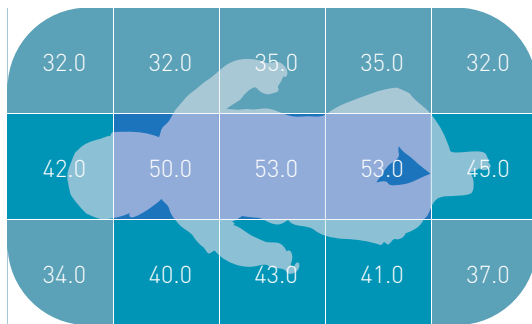

IRRADIANCE

$\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$


20.0 - 29.9

30.0 - 39.9

40.0 - 49.9

50.0 - 59.9

Điều chỉnh độ cao

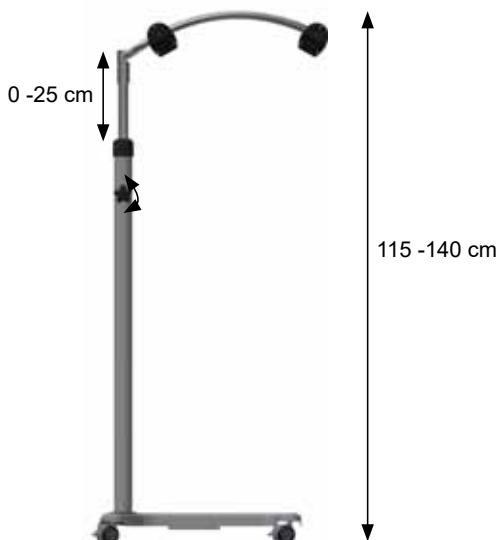

Khoảng cách thích hợp từ nguồn sáng đến bệnh nhân là 30-40 cm.



Cần thận trọng khi điều chỉnh chiều cao của Colibri Phototherapy.

Làm sạch và khử trùng



Nếu thấy bẩn hiện ra rõ ràng, sử dụng vải mềm, xà phòng và nước để làm sạch các phần bị bẩn. Sau đó lau sạch bằng vải ướt và lau khô bằng vải mềm. Đối với các vùng khó tiếp cận, sử dụng bông chải lông mềm theo tiêu chuẩn.



Để làm tan những vết bẩn đậm đặc và đã khô, đầu tiên, bạn cần làm bão hòa vết bẩn với nước



Ngắt kết nối điện khi vệ sinh thiết bị.